

Bruksanvisning, Lumos Pointer



On/Off

Håll intryckt 0,3 sekunder för att tända eller släcka



Anslutning för extern manöverkontakt..
Samma funktion som ovan.

Laser

Här ansluts lasermodulens kabel

Charge

Gul lysdiod för laddningsstatus
Micro USB-kontakt för laddning

Laddning

Lumos Pointer kan användas ca 40 timmar per laddning. När ca 1-1,5 timmar drifttid återstår visas detta genom en kort blinkning i laserljuspunkten varje sekund.

En fullständig laddning tar ca åtta timmar.

Under laddningen blinkar den gula lysdioden sakta. När batteriet är fulladdat övergår blinkandet till fast gult sken.

Lumos Pointer har inbyggd laddreglering. Den kan laddas med den medföljande laddaren, men även via andra USB-uttag till exempel på en dator eller mobilladdare.

Lasermodul

Viktigt!

Kabelns infästning är på grund av det lilla formatet känslig för åverkan. De röda O-ringar som finns på kabeln skall träs på glasögonskalmen så att kabeln fästs där och inte hänger direkt från lasermodulen.

Detta gäller både mitt- och sidomonterad lasermodul.

Den mittmonterade lasermodulen fästs med sitt clip på glasögonbågen.

Den sidomonterade fästs med en av de röda O-ringarna

Rengöring

Lumos Pointer kan rengöras med en lätt fuktad torkduk.

Skrotning

Lumos Pointer innehåller ett Li-Jon batteri. Detta lämnas till batteriåtervinning. Resten lämnas till återvinning för elskrot.

Gerdtsen & Andersson HB

Gråsparvsvägen 182

22731 Lund

lumos@peklampor.se

www.peklampor.se

